


## フェイスシールドについて

新型コロナウイルス感染症蔓延を受けてマスクが手離せない日々が続いております。

補聴器を装用される方の中には、話者の口元の動きを手掛かりにコミュニケーションをされる方も多くいらっしゃることに、また検音室はかなり密着する必要があることを考え、飛沫を防ぎながら口元が見えるフェイスシールドを作成しました。

皆様の日々に少しでも貢献できれば幸いです。ご活用ください。

ソノヴァ・ジャパン(株) 営業部

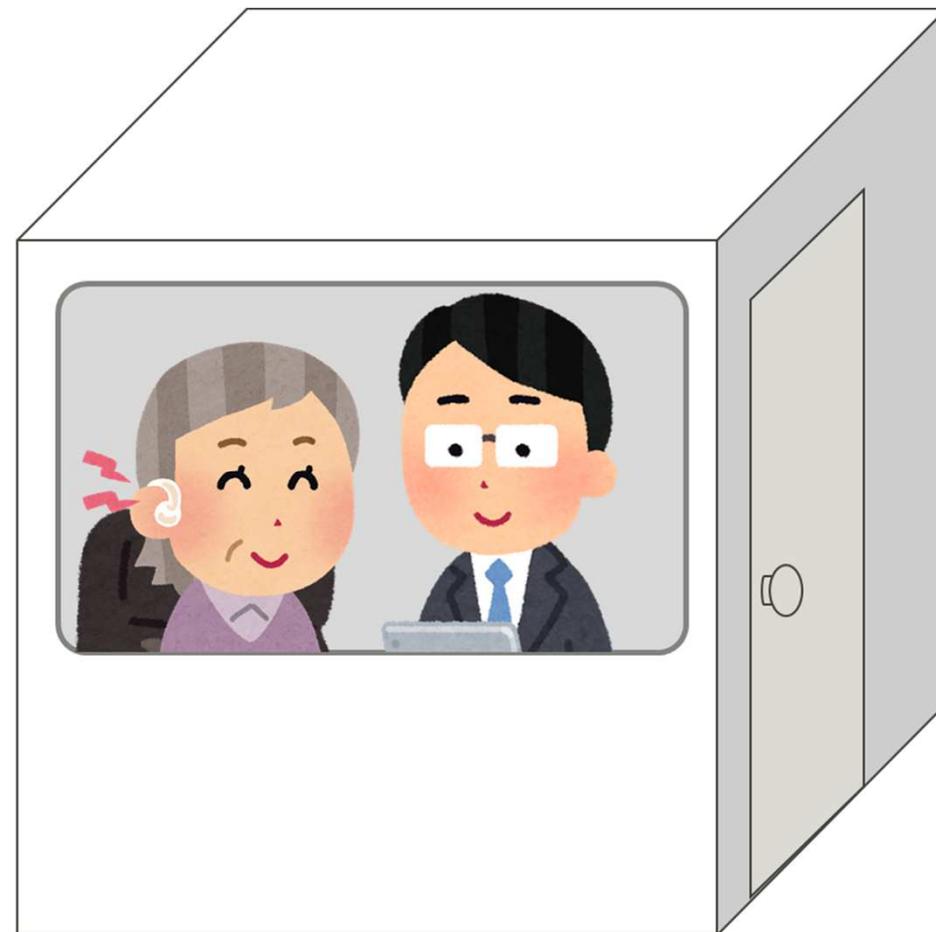


# フェイスシールドの使い方

- ① フェイスシールドの長い辺を上にし、内側から、左右の穴にメガネのツルを通します。



- ② メガネのブリッジ（二つのレンズを繋いでいるところ）を押し上げます。

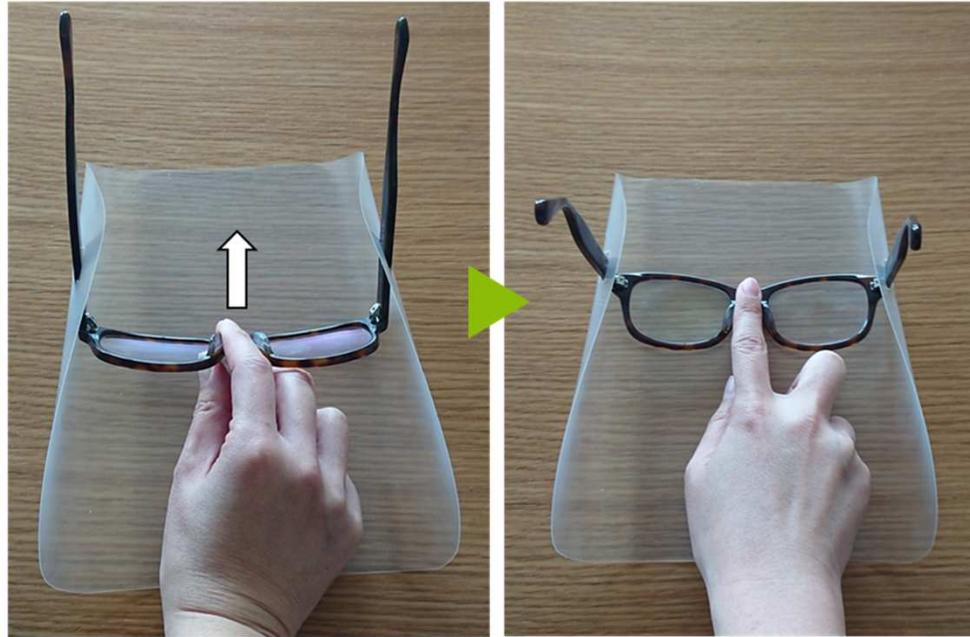

- ③ メガネをかけて、シールドが鼻に当たらないように位置・確度を調整します。



口元を見ていただけるように、こちらを使いますね。